



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Tub de legătură (aluminiu)	B50-ALU
----------------------------	---------

Acest produs este conform cu Specificația tehnică și cu cerințele Regulamentului (UE) MDR 2017/745 al Parlamentului European privind dispozitivele medicale și respectă cerințele prevăzute în Anexa I –Cerințe generale privind siguranța și performanța- și Anexa VIII – Reguli de clasificare. Conformitatea este declarată în baza Articolului 52(7), Anexa II și Anexa III din MDR 2017/745.

INFORMAȚIE

Data emiterii: 2025-04-15

Citiți cu atenție acest document înainte de utilizarea produsului și respectați indicațiile de siguranță.

Raportați producătorului sau autorității competente din țara dumneavoastră orice incident grav în legătură cu produsul.

Numele producătorului: Elitex Prodexim SRL

Adresa sediului social al producătorului: Ceuașu de Câmpie, str. Principală 7B, județul Mureș, România

INDICAȚII

Pierdere, amputarea sau deficiențe ale membrelor inferioare

Nu există contraindicații cunoscute

DESCRIERE

Acest produs este destinat confecționării protezelor modulare. Utilizarea pentru fabricarea unei proteze se va face numai în cadrul unui atelier specializat și avizat, de către personal care este calificat în mod corespunzător.

Combinarea produsului cu scopul de a realiza o proteză se poate face numai cu piese sau subansamble care sunt prevăzute în acel scop.

COMPOZIȚIE

Material: aluminu ENAW 2007

aluminu ENAW 6082

știft filetat M8x14 DIN 913

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Personalul medical trebuie să indice pacientului toate informațiile care sunt necesare pentru utilizarea în siguranță a dispozitivului.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

1. Strângeți tubul cu un dispozitiv de tăiere sau puneți-l într-un dispozitiv de tăiere a tuburilor.

Atenție: Strângerea prea puternică poate deteriora dispozitivul.

2. Tăiați tubul drept și perpendicular.

Avertisment: Nu tăiați adaptorul mai scurt decât lungimea minimă de tăiere.

3. Îndepărtați toate bavurile și introduceți complet tubul în adaptor.

Avertisment: Pentru o fixare sigură, folosiți o pastă de blocare de rezistență medie pentru filete (de ex. Loctite 243) și aplicați cuplul de 10 Nm.

ÎNȚREȚINERE

Dispozitivul și proteza generală trebuie examinate de către un profesionist din domeniul medical. Intervalul trebuie determinat pe baza activității pacientului.

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

Curățați cu o lavetă umedă și un săpun neagresiv. Uscați cu o lavetă după curățare.

ATENȚIONARE

Slăbirea asamblării filetate poate duce la accidente. Greutatea maximă admisă este de 100 kg.