



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Articulație mobilă de gleznă (aluminiu)

GLE10-ALU

Acest produs este conform cu Specificația tehnică și cu cerințele Regulamentului (UE) MDR 2017/745 al Parlamentului European privind dispozitivele medicale și respectă cerințele prevăzute în Anexa I –Cerințe generale privind siguranța și performanța- și Anexa VIII – Reguli de clasificare. Conformitatea este declarată în baza Articolului 52(7), Anexa II și Anexa III din MDR 2017/745.

INFORMAȚIE

Data emiterii: 2025-04-15

Citiți cu atenție acest document înainte de utilizarea produsului și respectați indicațiile de siguranță.

Raportați producătorului sau autorității competente din țara dumneavoastră orice incident grav în legătură cu produsul.

Numele producătorului: Elitex Prodexim SRL

Adresa sediului social al producătorului: Ceuașu de Câmpie, str. Principală 7B, județul Mureș, România

INDICAȚII

Pierdere, amputarea sau deficiențe ale membrelor inferioare

Nu există contraindicații cunoscute

DESCRIERE

Acest produs este destinat confecționării protezelor modulare. Utilizarea pentru fabricarea unei proteze se va face numai în cadrul unui atelier specializat și avizat, de către personal care este calificat în mod corespunzător.

Combinarea produsului cu scopul de a realiza o proteză se poate face numai cu piese sau subansamble care sunt prevăzute în acel scop.

COMPOZIȚIE

Material: aluminiu ENAW 2017

oțel inoxidabil laminat EN 1.4305

bucșă de bronz sinterizat 10x13x10 (SINTEROM)

piulită cu autoblocare M7 DIN 985

șaiă plată M7 DIN 125

șaiă Grower M7 DIN 127

polietilenă de înaltă densitate

poliuretan 65 SHORE

știft D10x45 DIN 7

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Personalul medical trebuie să indice pacientului toate informațiile care sunt necesare pentru utilizarea în siguranță a dispozitivului.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

Asamblarea cu labă protetică mobilă se realizează cu ajutorul piuliței cu autoblocare M7 DIN 985. Momentul aplicat trebuie să fie 10 Nm.

Fixarea la restul protezei se realizează prin sistemul standard piramidal prin strângerea celor 4 știfturi filetate din tubul de legătură.

Pentru o fixare sigură, folosiți o pastă de blocare de rezistență medie pentru filete (de ex. Loctite 243) și aplicați cuplul de 10 Nm.

ÎNTREȚINERE

Dispozitivul și proteza generală trebuie examinate de către un profesionist din domeniul medical. Intervalul trebuie determinat pe baza activității pacientului.

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

Curățați cu o lavetă umedă și un săpun neagresiv. Uscați cu o lavetă după curățare.

ATENȚIONARE

Slăbirea asamblării filetate poate duce la accidente. Greutatea maximă admisă este de 100 kg.