



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Shuttle lock cu șuruburi	SL-2
--------------------------	------

Acest produs este conform cu Specificația tehnică și cu cerințele Regulamentului (UE) MDR 2017/745 al Parlamentului European privind dispozitivele medicale și respectă cerințele prevăzute în Anexa I –Cerințe generale privind siguranța și performanța- și Anexa VIII – Reguli de clasificare. Conformitatea este declarată în baza Articolului 52(7), Anexa II și Anexa III din MDR 2017/745.

INFORMAȚIE

Data emiterii: 2025-04-15

Citiți cu atenție acest document înainte de utilizarea produsului și respectați indicațiile de siguranță.

Raportați producătorului sau autorității competente din țara dumneavoastră orice incident grav în legătură cu produsul.

Numele producătorului: Elitex Prodexim SRL

Adresa sediului social al producătorului: Ceușu de Câmpie, str. Principală 7B, județul Mureș, România

INDICAȚII

Pierderea, amputarea sau deficiențe ale membrelor inferioare

Nu există contraindicații cunoscute

DESCRIERE

Acest produs este destinat confecționării protezelor modulare. Utilizarea pentru fabricarea unei proteze se va face numai în cadrul unui atelier specializat și avizat, de către personal care este calificat în mod corespunzător.

Combinarea produsului cu scopul de a realiza o proteză se poate face numai cu piese sau subansamble care sunt prevăzute în acel scop.

COMPOZIȚIE

Material: aluminiu ENAW 2007

oțel inoxidabil laminat EN 1.4305

oțel carbon EN 1.0715

sârmă de oțel arc OLC55-A

rulment cu ace unisens 8x12x22 HFL0822

șurub M4x8 DIN 912

știft filetat M8x14 DIN 913

INSTRUCȚIUNI GENERALE DE SIGURANȚĂ

Personalul medical trebuie să indice pacientului toate informațiile care sunt necesare pentru utilizarea în siguranță a dispozitivului.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

1. Utilizați adaptorul laminare shuttle lock pentru a conecta SL-2 la cupa protezei.
2. Înșurubați mecanismul în adaptorul laminat în cupă.
3. Reglați mecanismul în poziția necesară, ca genunchiul să fie aliniat conform cerințelor.
4. Strângeți șurubul de pe adaptor pentru a fixa mecanismul în poziție.

Asamblarea cu restul protezei se realizează prin sistemul standard piramidal prin strângerea celor 4 știfturi filetate.

Avertisment: După ajustări, toate șuruburile trebuie să fie fixate cu o pastă de blocare de rezistență medie pentru filete (Locktite 243) și strânse cu cuplu de 10 Nm.

ÎNȚREȚINERE

Dispozitivul și proteza generală trebuie examinate de către un profesionist din domeniul medical. Intervalul trebuie determinat pe baza activității pacientului.

CURĂȚARE ȘI ÎNGRIJIRE

Curățați cu o lavetă umedă și un săpun neagresiv. Uscați cu o lavetă după curățare.

ATENȚIONARE

Slăbirea asamblării filetate poate duce la accidente. Greutatea maximă admisă este de 125 kg.